

Gotowe okulary do czytania marki BRANDEX to wyrób medyczny zgodny z normą PN-EN 14139:2010 oraz z Rozporządzeniem (UE) 2017/745. Dostępne moce soczewek okularów marki BRANDEX to :+1,00, +1,50, +2,00, +2,50, +3,00, +3,50. Wielkość dioptrii jest oznaczona na jednej z soczewek oraz na wewnętrznej części jednego z zauszników. Odległość od środka optycznego (PD) (mm) 58-66 (+/-1mm) - oznaczona jest na wewnętrznej części zausznika.

Okulary marki BRANDEX poprawiają widzenie, służą do okazjonalnego , krótkotrwałego użytku dla osób, które mają jednakową wadę w obu oczach , jednak nie mogą zastąpić okularów do codziennego użytku. Gotowe okulary do czytania to świetna opcja dla osób, którym niewielka wada wzroku nie przeszkadza znacząco w codziennym funkcjonowaniu, a które potrzebują wsparcia widzenia tylko w niektórych sytuacjach, np. podczas czytania, oglądania telewizji czy robótek ręcznych.



Ostrzeżenia: Dobór odpowiednich okularów należy skonsultować z okulistą. Tylko regularne profesjonalne badanie okulistyczne może określić stan zdrowia oczu i potrzeby związane z widzeniem. Gotowe okulary do czytania służą wyłącznie do bliży.

Pielęgnacja: Aby okulary spełniały swoją funkcję należy okulary należy przechowywać w etui, chronić przed zarysowaniem i upadkiem, czyścić miękką ściereczką. Przy dużych zabrudzeniach przemyć delikatnie wodą, a następnie osuszyć.

Przeciwwskazania dotyczące używania wyrobu

- Okularów do czytania nie należy stosować w celu ochrony oczu przed promieniowaniem , nie należy stosować jako okularów ochronnych.
- Nie należy używać ich do widzenia dalekiego
- Nie wolno stosować w czasie kierowania pojazdami.
- Nie można używać okularów, gdy szkła lub oprawki są uszkodzone, należy wymienić wówczas okulary na nowe.
- Przeciwwskazaniem są również ostre krawędzie lub wystające elementy, które mogą spowodować uraz pacjenta, który będzie użytkował okulary do czytania.
- W przypadku wystąpienia uczulenia lub podrażnienia skóry po kontakcie z wyrobem należy skonsultować się z lekarzem

- Dla uniknięcia deformacji oprawy oraz powstawania naprężeń w soczewkach, nie wolno zakładać i zdejmować okularów jedną ręką.
- Należy chronić je przed działaniem wysokich temperatur i nie narażać na kontakt z twardymi i szorstkimi materiałami, a także z substancjami aktywnymi chemicznie jak opary, lakiery.

Uszkodzenia mechaniczne (w tym zarysowanie, wyszczerbienie, stłuczenie soczewek, pocięcie lub złamanie opraw okularowych) oraz wpływ substancji chemicznych nie są objęte gwarancją ani rękojmią. Dla zmniejszenia naturalnego zużycia okularów, należy dokonywać przeglądu okularów i konserwacji (np. poprzez dokręcanie śrubek).

UWAGA:

W przypadku wystąpienia poważnego incydentu podczas używania wyrobu medycznego – Gotowe okulary do czytania – fakt ten należy niezwłocznie zgłosić do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

e-mail: incydenty@urpl.gov.pl

list polecony lub przesyłka kurierska: al. Jerozolimskie 181c, 02-222 Warszawa

fax: 48 22 492 11 29

6. Informacja o okresie trwałości produktu

Wyrób można używać do momentu, kiedy zachowuje swoje pierwotne właściwości, kiedy można wciąż zapewnić jego prawidłowe dopasowanie, do czasu, kiedy będzie spełniał właściwie swoją funkcję.

7. Data wydania instrukcji 20.09.2023